

Istruzioni per l'uso

941256 Staffa per il montaggio del VT su un Elite Blade

Le presenti istruzioni sono destinate all'uso esclusivamente da parte di medico o tecnico qualificato.

Utilizzare sempre i dispositivi per salute e sicurezza appropriati come anche i dispositivi di estrazione.


Per paziente che utilizza Elite Blade:

Se il VT viene montato su un Elite Blade con attacco prossimale a piramide scorrevole, l'ingombro verticale è lo stesso. Queste istruzioni si applicano anche alla versione con Piramide Femmina (VTF). Invertire l'alloggiamento superiore per VT utilizzando gli stessi fori. Accertarsi che le viti siano serrate correttamente al valore di coppia 25Nm e che sulla filettatura sia stato utilizzato il prodotto Loctite 243.

Contenuto del kit:

- Struttura di serraggio per sagoma di taglio e foratura, viti e rondelle
- Chiave a brugola 3,0
- Chiave a brugola 5,0
- Trapano con punta diametro 8,1mm

Componenti sagoma di taglio e foratura:

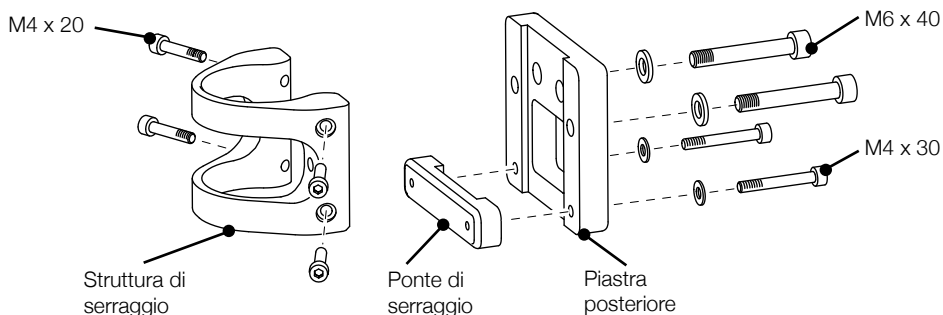


Procedura per l'utilizzo della sagoma di taglio e foratura per il montaggio di VT su Elite Balde

Viene mostrata la versione con Piramide Maschio (VTM). Queste istruzioni si applicano anche alla versione con Piramide Femmina (VTF).

- 1** Misurare e tagliare Elite Blade a una misura approssimativa lasciando 10-15mm per la rifilatura finale. Rimuovere le 4 viti di tenuta nel VT e metterle da parte. Applicare la struttura di serraggio della sagoma di taglio a VT utilizzando le viti 4x M4 x 20.



- 2** Senza stringere, fissare la piastra posteriore alla struttura di serraggio utilizzando i bulloni 2 x M6 x 40 e le rondelle. Senza stringere, fissare il ponte di serraggio alla piastra posteriore utilizzando le viti 2 x M4 x 30 e le rondelle.

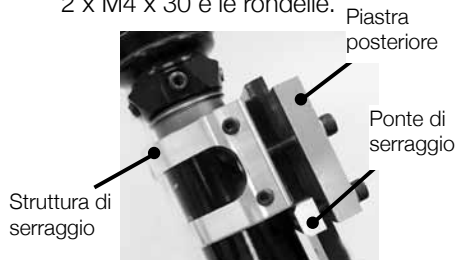

- 3** Fissare la sagoma di taglio e VT su Elite Blade e serrare le 4 viti di serraggio a 10Nm.



- 4** Regolare la posizione dell'altezza di VT in modo da adattarsi al paziente, accertarsi che le viti di serraggio siano serrate con coppia pari a 10Nm dopo la regolazione. Confermare la lunghezza effettuando una breve camminata di prova limitandosi alla sala di montaggio.



5


Rilasciare la struttura di serraggio/VT da Elite Blade svitando le viti 2x M6 della struttura di serraggio (**NON** le 2 viti del ponte di serraggio).

**6**

Tagliare la lamina in base alla lunghezza impostata utilizzando la piastra posteriore come guida.

**7**

Praticare due fori da 8,1mm in Elite Blade per i bulloni di fissaggio con la punta fornita utilizzando i fori superiori sulla piastra posteriore come guida. Sbavare la parte terminale della lamina.

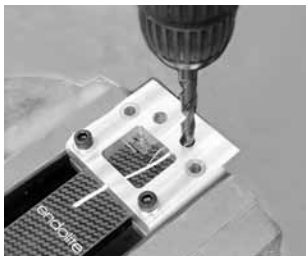**8**

Allentare le viti e rimuovere la piastra posteriore e il ponte di fissaggio da Elite Blade. Sbavare la parte terminale della lamina con una lima.

**9**

Rimuovere la sagoma di taglio da VT. Rimontare le piccole viti di tenuta su VT.

**10**

Montare VT su Elite Blade utilizzando le viti in dotazione con VT ed usare Loctite 243 per serrare le viti con valore di coppia 25Nm.



Distributore

Head Office

Chas A Blatchford & Sons Ltd
Lister Road
Basingstoke
Hampshire
RG22 4AH
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1256 316600
Fax: +44 (0) 1256 316617
Email: sales@blatchford.co.uk
www.endolite.co.uk

Customer Services UK

Prosthetic and Orthotic Products
11 Atlas Way
Atlas North
Sheffield
S4 7QQ
United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 263 7900
Fax: +44 (0) 114 263 7901
Email: sales@blatchford.co.uk
www.endolite.co.uk

endolite North America

1031 Byers Road
Miamisburg
Ohio 45342
USA
Tel: 800.548.3534
Fax: 800.929.3636
Email: info@endolite.com
www.endolite.com

endolite Germany

Endolite Deutschland GmbH
Holzstr. 5
95336 Mainleus
GERMANY
Tel: +49 9229 9737 001
Fax: +49 9229 9737 006
Email: info@endolite.de
www.endolite.de

endolite France

Parc d'Activités de l'Aéroport, 125 Impasse
Jean-Baptiste Say
34470 PEROLS
FRANCE
Tel: 33 467 820820
Fax: 33 467 073630
Email: endolitefrance@free.fr
www.endolite.fr

endolite India Ltd

A4 Naraina Industrial Area
Phase 1
New Delhi – 110028
INDIA
Tel: 91 11 45689955
Fax: 91 11 25891543
Email: endolite@vsnl.com
www.endoliteindia.com

